

Alcoholímetro Digital MR806

PORTÁTIL | PRECISO | FÁCIL DE USAR

**Cuida tu vida y la de los demás.
Mide, decide, conduce seguro.**



**USO
PERSONAL**



**CONTROLA
TU LIMITE**



**PREVENCIÓN
DE RIESGOS**



**IDEAL PARA
EMPRESAS**



**PRODUCTO
IMPORTADO**

CALIDAD Y CONFIANZA



Boquilla de soplado
removible



DESCRIPCIÓN

El alcoholímetro digital MR806 es un dispositivo portátil y fácil de usar, diseñado para medir la concentración de alcohol en el aliento. Ideal para uso personal, laboral y empresarial, ayuda a prevenir accidentes y fomentar una conducción responsable.



**RESULTADOS
RÁPIDOS**



**DISEÑO
PORTÁTIL**



**FÁCIL
DE USAR**



**ALERTA
SONORA**



**INDICADOR
LED**



**FUNCIONA CON
3 PILAS AAA**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	MR806
Tipo de sensor	Sensor de gas semiconductor
Rango de medición	0 – 200 mg/100 ml (0.000 – 0.200 %BAC / 0.000 – 2.000 g/L / 0.000 – 2.000 mg/L)
Unidades de lectura	%BAC, g/L, mg/L
Tiempo de calentamiento	Aproximadamente 10 segundos
Tiempo de respuesta	Resultado en segundos
Alimentación	3 baterías AAA de 1.5 V (4.5 V)
Dimensiones	98 x 47 x 23.1 mm (aprox.)
Peso	45 g (aprox.)
Temperatura de operación	-5 °C a 45 °C
Material	Plástico ABS de alta resistencia
Color	Negro
Certificaciones	CE, FCC, RoHS

PANTALLA Y FUNCIONES



¿CÓMO USARLO?

- 1 Presiona el botón de encendido (⏻).
- 2 Espera el precalentamiento (aprox. 10 segundos).
- 3 Cuando la pantalla indique "Blow", sopla en la boquilla.
- 4 El dispositivo mostrará el resultado en la pantalla.
- 5 Espera al menos 3 minutos entre mediciones.

INDICADOR LED

	Luz verde	Sin alcohol o dentro del rango permitido.
	Luz amarilla	Presencia de alcohol en rango intermedio.
	Luz roja	Nivel alto de alcohol y alarma sonora.

Los umbrales pueden variar según la versión del equipo. No usar como referencia de límites legales para conducir.

CONTENIDO DEL EMPAQUE



RECOMENDACIONES

- ✓ Espera al menos 20 minutos después de beber, comer o fumar para realizar una prueba.
- ✓ Utiliza una boquilla personal por persona.
- ✓ Evita realizar pruebas en ambientes con humo, perfumes u olores fuertes.
- ✓ Mantén el equipo limpio y en un lugar seco.
- ✓ Realiza varias pruebas si es la primera vez que lo usas o si estuvo guardado por mucho tiempo.
- ✓ No es un equipo de uso legal ni reemplaza una prueba oficial de alcoholemia.

ADVERTENCIAS

- ⚠ Este equipo es solo para uso personal y de referencia.
- ⚠ No determina la aptitud legal para conducir.
- ⚠ Los resultados pueden verse afectados por alcohol residual, alimentos, humo, medicamentos u otras condiciones.
- ⚠ No lo expongas a altas temperaturas ni a la humedad.
- ⚠ Mantén fuera del alcance de niños.

**CONDUCE
RESPONSABLE**
**LA DECISIÓN
TAMBIÉN ESTÁ
EN TUS MANOS**

